

## Senden von Untersuchungsdaten vom OPTOPOL Perimeter (PTS 920, PTS 925, PTS 2000)

Es gibt 2 Methoden zu senden:


### NEUE Untersuchungsdaten direkt nach der Untersuchung exportieren

Drücke den "Daten exportieren"-Button.



### GESPEICHERTE (frühere) Untersuchungen exportieren


- Patient wählen
- Menü **Auswertung** öffnen
- **Untersuchung** wählen
- Button **Filtern...**

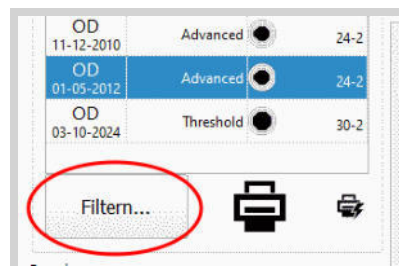

- Fenster **Untersuchungsfilter** öffnet sich
- Symbol **Export** (Pfeil rechts) drücken



- Auswahl entspricht der Konfiguration
- wähle "**Aktuelle Untersuchungen**" oder "**Alle Untersuchungen..**"
- Symbol **Speichern** (Diskette) drücken

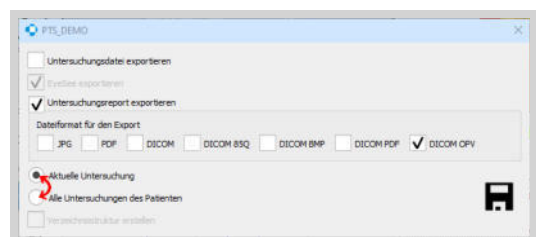

Wenn PeriData beim Sendevorgang noch nicht geöffnet ist, liegt das Daten-File im Exchange-Ordner und wird beim nächsten Öffnen von PeriData importiert.

### Problemlösungen

Es kommen keine Daten in PeriData an

1. Ist in PeriData eine Datenbank offen?
2. Überprüfe das Verzeichnis *C:\PeriDataExchange*. Wenn dort keine Datei mit der Endung **.DCM** liegt, dann hat das Optopol-Programm nicht gesendet
3. Wenn in dem Verzeichnis **.DCM**-Dateien "warten", dann öffne das Menü Extras > Optionen > Tab Perimeter und überprüfe die Einstellungen
4. Manche Untersuchungen (kinetisch) werden nicht gesendet.