

PeriData - Tomedo - Interface

Stand: 20.05.2025

J. Weber, PeriData Software GmbH

Allgemeine GDT-Schnittstellenbeschreibung zu PeriData

www.peridata.com/help/html_german/p_ge_linkmode_gdt_specs.htm

Vorbemerkung

Diese Dokumentation ist unvollständig. Die Konfiguration der Schnittstelle liegt in der Hand des Praxissoftware-Providers. Die Informationen sollen nur als Ergänzung dienen

Die folgenden Infos beziehen sich auf einen Windows-PC mit PeriData und ggf. dem Perimeter-Geräte-Programm. Die Verbindung zu Tomedo wird über die TOMEDO-LINK-APP hergestellt.

Zusätzliche Batch-Dateien sind nicht notwendig, da die Tomedo-Link-App alle notwendigen Kommandozeilen-Parameter liefern kann

Installation und Verzeichnisse anlegen

1. DATEN- VERZEICHNIS: Anlage des EINZIGEN Daten-Verzeichnisses für permanente Gesichtsfeld-Dateien auf dem Server (z.B. NAS)

für die PeriData-Files (.PHF und .PHD)

Vorschlag: <Server> \fremddaten\PeridataFiles\

2. PROGRAMM: Installation des Programms auf dem Windows-PC

Download der aktuellen Setup-Version von peridata.com und Installation im vorgeschlagenen Verzeichnis auf dem Windows-PC

3. GDT-VERZEICHNIS: für die temporärem GDT-Austausch-Dateien auf dem Windows-PC

C:\GDT\Peridata wird bei der Installation automatisch angelegt

für Import und Export der GDT-Files

4. ROHDATEN-VERZEICHNIS: für Rohdaten vom Perimeter auf dem Windows-PC

C:\PeriDataExchange wird bei der Installation automatisch angelegt

NICHT für GDT-Files verwenden !

für temporäre Importfiles (Rohdaten) *.dcm *.pdi *.hfa *.oc1 *.oc5

für Import-Fehlermeldungen Error*.*

Backup-Files der Optionen *.opt

PeriData-Icons und Bitmaps

Unterverzeichnis **Log** für Log-Dateien (Installations-Log, letzte Files, Konfiguration)

Unterverzeichnis **Gdt2Perimeter**: für Datenexport zum Perimeter

Konfiguration der TOMEDO-LINK-APP

Allgemeines

Die images zeigen "peridata" als Schnittstellen-Name, die Schreibweise "PeriData" wäre wünschenswert

Programm-Aufruf ("Datei-Exportbutton")

Argumente - /DATA: (Datenpfad) - bei der Verwendung eines gemappten Laufwerks, das auf einen NAS-Ordner zeigte, gab es Probleme beim Zugriff. Der direkte UNC-Pfad funktionierte.

GDT-Export ("Datei-Export")

Der Filename ist PERI tome.gdt. PeriData liest **alle Files** mit dem Filter **PERI*.***

GDT-Import ("Datei-Import")

The screenshot shows the 'Datei-Import' settings window in a software application. The window is titled 'Datei-Import' and is part of the 'Einstellungen' (Settings) section. The left sidebar contains various settings categories, including 'Datei-Export', 'Datei-Import', 'Skripte', 'Vorlagenverwaltung', 'Zus. Schnittstellen', 'Symbolleiste', 'Datei-Exportbutton', 'Arbeitsplatz', 'Grundeinstellungen', 'Server', and 'Serveradresse'. The main content area is divided into several sections:

- Dateilauscher-Einstellungen:** Includes fields for 'Name*' (peridata), 'Dateilauscher*' (GDT), 'Prüfhierarchie* (Default-Einstellung)' (Windows CP1252), and 'Verzeichnispfad*' (C:\GDT\Peridata). There is a note: 'Dieses Verzeichnis wird von allem GDT-Export verwendet.' Below this are checkboxes for 'Rekursive Suche in Unterordnern' and 'Aller: 5,0' (Sekunden prüfen, ob Datei fertig geschrieben ist.).
- Datei zum Testen:** A section for testing the file.
- Dateiinhalts-Filter:** Includes a checkbox for 'Abweichende Patientcnidont' and an 'Additionskonstante' field.
- Karteeintrag:** Includes a checked checkbox for 'stets neuen Karteeintrag erstellen' and an unchecked checkbox for 'GDT-Datei an Karteeintrag anhängen'.
- Karteeintragstyp*:** A dropdown menu set to 'GF'.
- Karteeintragstext-Felder:** A table with columns for field name and value:

Field Name	Value
Untersuchungs: 6200 (dd.)	-
Untersuchungs: 6201 (hh)	-
Kommentar: 6227	-

At the bottom, there is a 'Dateifilter und Pattern' section with a text box containing 'TOME*PERI*' and a note 'case-sensitiv !!' pointing to it. A 'Zurücksetzen' button is located at the bottom right of the window.

Der Filename ist TOME*PERI.001 .. 002 (ein File für jede neue Untersuchung). Die 4 Buchstaben "TOME" werden aus der Angabe des Client beim Programm-Aufruf gebildet. Wenn dort nicht "tomedo" steht, stimmt hier der Name nicht