

PeriData - Turbomed - Interface

Stand: 18.03.2024

J. Weber, PeriData Software GmbH

Allgemeine GDT-Schnittstellenbeschreibung zu PeriData

www.peridata.com/help/html_german/p_ge_linkmode_gdt_specs.htm

Verzeichnisse

1. Anlage des EINZIGEN Daten-Verzeichnisses für permanente Gesichtsfeld-Dateien nur auf dem Server

für die PeriData-Files (.PHF und .PHD)

üblich: <Server> \turbomed\Dokumente\PERIDATA\

Vorschlag: <Server> \turbomed\Dokumente\PeridataFiles\

2. Installation des Programms auf jedem Rechner

Download der aktuellen Setup-Version von peridata.com und Installation im vorgeschlagenen Verzeichnis auf JEDEM PC (Terminal-Server-Architektur: nur auf dem Server)

3. Anlage des GDT-Verzeichnisses für temporäre Austausch-Dateien auf jedem Rechner

für Import und Export der GDT-Files

Vorschlag: C:\GDT

4. Rohdaten-Austausch-Verzeichnis C:\PeriDataExchange wird bei der Installation automatisch angelegt

NICHT für GDT-Files verwenden !

für temporäre Importfiles (Rohdaten) *.dcm *.pdi *.hfa *.oc1 *.oc5

für Import-Fehlermeldungen Error*.*

Backup-Files der Optionen *.opt

PeriData-Icons und Bitmaps

Unterverzeichnis **Log** für Log-Dateien (Installations-Log, letzte Files, Konfiguration)

Unterverzeichnis **Gdt2Perimeter**: für Datenexport zum Perimeter

Konfiguration des GDT-Formulars in TurboMed

Allgemeines

Grundeinstellungen > Verzeichnisse > Formulare .. **zentral legen !**

Aufruf des Formular-Dialog

Menü Geräte >> GDT-Einstellungen

Tab "Übersicht"



Name: PeriData

GDT 2.1 nutzen JA GDT 3.1 NEIN (es gab Probleme)

Programm: **C:\Programme\PeriData\PeriWin\Periwin.exe** (Standard-Verzeichnis)

Parameter: **/mode:GDT /client:Turbomed /GDT:C:\GDT\ /Data:\\server\PeridataFiles** (Data-Ordner kann auch anders heissen)

Programm aufrufen beim Export: JA

Pfad: C:\GDT (für Import und Export)

Dateiname: export: periturb.gdt - import: turbperi.* (nach GDT-Regeln)

Beim Export aus Menü Formular anzeigen = JA


Automatischer Export beim Formularaufruf aus dem Menü = Ja

Automatischer Export beim Formularaufruf aus der Karteikarte = Ja (dann funktioniert der Doppelklick auf eine PeriData-Zeile in der Akte)

Beim Import Formular anzeigen= NEIN

alle anderen Checkboxes = NEIN

Tab "Export"

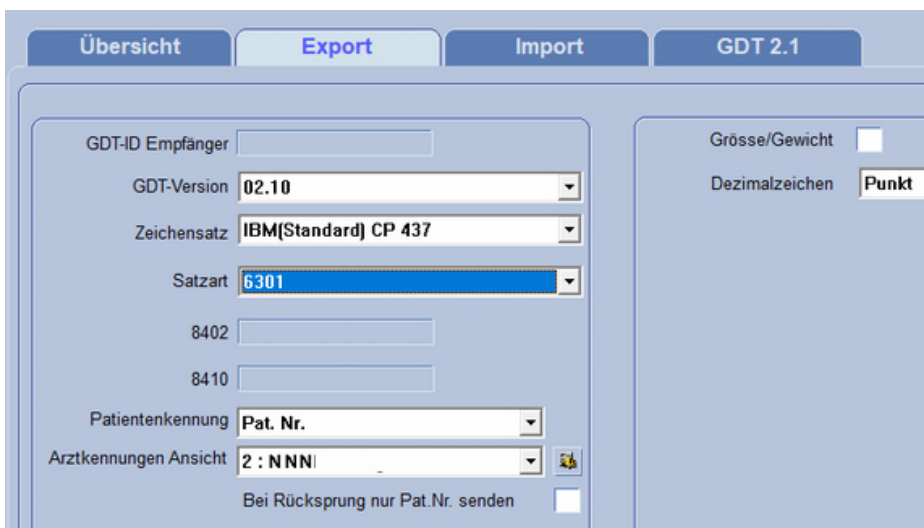

GDT-Version 2.1

CodePage 437

Satzart 6301

Tab "Import"

Übersicht Export Import GDT 2.1

Zeichensatz

9206

IBM/OEM

ANSI

Eintragsdatum

Aktuelles Tagesdatum

Untersuchungsdatum (Feldkennung 6200)

Abnahmedatum (Feldkennung 8432)

Arztkenennung

Arztkenennung verwenden

Meldung

Bei Abweichungen vom Standard Meldung ausgeben

Formulareintrag

Texteintrag

Rücksprung

GDT Hyperlinkeintrag

Sonderfunktionen

Zeichensatz: ANSI

Datum aus Feld 6200

Texteintrag: JA

Das Feld BEMERKUNGEN wird leider nicht importiert

Tab "GDT 2.1"

Übersicht Export Import GDT 2.1

Hyperlink

Datei nicht kopieren

Datei auf Server kopieren

Datei auf Server kopieren und löschen

Karteieintrag

Karteieintrag nach Typ

Speicherpfad

TurboMed\Dokumente

Anderer

JahrMonat

Dateiimportpfad

(x) Datei nicht kopieren

..